

ATELLE DE SOULAGEMENT POUR POIGNET

Visitez www.clikit.ca pour découvrir toute notre gamme de produits


COMMENT BIEN UTILISER:

POUR LA MAIN GAUCHE:

- L'attelle est livrée propice à une utilisation immédiate sur la main gauche.
- Enfilez l'attelle sur votre main en insérant votre pouce dans le trou prévu à cet effet. Le trou pour le pouce devrait être sur la droite.
- Le logo Copper Fit® devrait être face vers le haut et votre paume devrait s'appuyer sur le coussinet perlé (Illustration B).

POUR LA MAIN DROITE:

- Retirez le stabilisateur flexible de sa pochette (Illustration C).
- Retournez l'attelle à l'envers. Le trou pour le pouce devrait être à gauche.
- Enfilez l'attelle sur votre main en insérant votre pouce dans le trou prévu à cet effet.
- Le logo Copper Fit® devrait être face vers le haut et votre paume devrait s'appuyer sur le coussinet perlé
- Réinsérer le stabilisateur flexible (Illustration E).

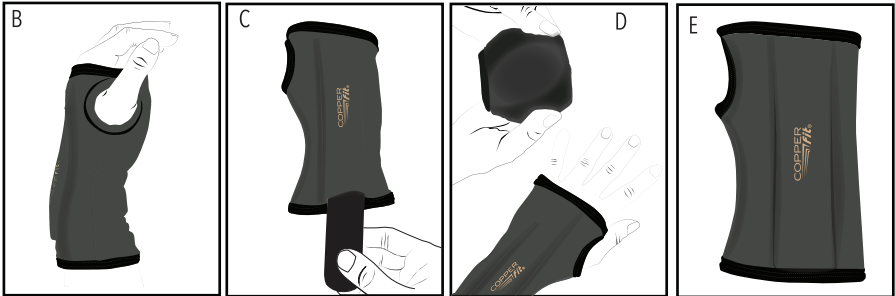

LIMITE DE RESPONSABILITÉ : La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.

Distribué par:
SUPERTEK CANADA Inc., Mont-Royal QC H4T 1X2
WWW.CLIKIT.CA

Service à la clientèle: 1-800-304-8354 • Pour plus d'informations, visitez clikit.ca