

MERCI D'AVOIR ACHETÉ LE BANDAGE COPPER FIT

Le bandage Copper Fit Rapid Relief Dos renferme un sachet de gel chaud/froid ou un support lombaire dans une pochette intérieure. La thérapie par le chaud/froid aide à réduire les douleurs musculaires et articulaires ainsi que les inflammations. Le support lombaire aide à stabiliser votre corps, à améliorer votre posture et à réduire le stress et la douleur au bas du dos, vous permettant ainsi de bouger librement. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le bandage Copper Fit Rapid Relief Dos, le sachet de gel chaud/froid ou le support lombaire. **Voyez toute la collection au www.clikit.ca**

AVERTISSEMENTS :

Veuillez laver le bandage avant de l'utiliser. Les bandages de compression peuvent causer des irritations ou autres problèmes cutanés spécialement lorsque vous avez chaud et suiez. Le bandage doit comprimer mais ne doit pas être trop serré afin d'éviter de restreindre la circulation. Ne placez pas le bandage Rapid Relief au congélateur, au micro-ondes ou dans l'eau chaude mais seulement le sachet de gel. Ne portez pas le bandage Rapid Relief avec le sachet de gel chaud/froid et le support lombaire en même temps.

NÉOPRÈNE :

Le produit renferme du néoprène, un caoutchouc synthétique (polychloroprène). N'utilisez pas ce produit si vous êtes allergique au néoprène. Cessez d'utiliser le produit et consultez un médecin si vous avez des douleurs, des éruptions ou tout autre symptôme.

ENTRETIEN DU BANDAGE RAPID RELIEF

LAVEZ-LE RÉGULIÈREMENT • LAVEZ-LE À LA MAIN SOUS L'EAU FROIDE ET LAISSEZ SÉCHER À L'AIR • NE PAS JAVELLISER • NE PAS REPASSER • NE PAS NETTOYER À SEC • NE PAS SÉCHER À LA MACHINE

Le sachet de gel devrait être utilisé à des intervalles de 20 minutes. Il n'est pas recommandé d'utiliser le sachet de gel plus longtemps.

UTILISATION DU SACHET FROID :

Placez le sachet de gel à plat dans le congélateur pendant au moins 2 heures avant de l'utiliser. Le sachet sera givré en raison de l'humidité contenue à l'intérieur. Le sachet restera froid même lorsque le givre ne sera plus visible.

UTILISATION DU SACHET CHAUD: MÉTHODE AVEC EAU CHAUDE:

MISES EN GARDE: NE MANIPULEZ PAS LE SACHET DE GEL AVEC LES MAINS NUES LORSQUE VOUS L'IMMERGEZ OU LE SORTEZ DE L'EAU CHAUDE.

Utilisez un outil adéquat comme une cuillère en bois. Immergez soigneusement le sachet de gel dans un bol d'eau chaude pendant 20 à 30 secondes. À l'aide d'une cuillère, retirez le sachet de gel du bol et déposez-le sur une serviette. Si le sachet de gel n'est pas à la température désirée, remettez-le dans le bol d'eau chaude pendant 10 secondes additionnelles à la fois jusqu'à ce qu'il atteigne la bonne température.

MÉTHODE AU MICRO-ONDES :

Enveloppez votre sachet de gel dans un linge humide ou un essui-tout. Déposez-le à plat dans le micro-ondes et faites le chauffer comme suit :

Temps de chauffage suggérés	800 watts	1 000 watts	1 200 watts
	40 secondes	30 secondes	20 secondes

Si le sachet de gel n'est pas à la bonne température, remettez-le au micro-ondes pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'il soit à la température désirée. **NE DÉPASSEZ PAS 2** (deux) cycles additionnels de 10 secondes.

Il n'est pas recommandé de chauffer le sachet de gel plus longtemps que suggéré.

AVERTISSEMENT ! Le sachet de gel sera chaud lorsque vous le sortirez du micro-ondes.

AVERTISSEMENT ! Ne jamais utiliser le sachet de gel si sa température est supérieure à 49°C (120°F).

MISES EN GARDE: Ce produit peut causer des brûlures ou des engelures. **NE PLACEZ PAS** le sachet de gel directement sur la peau. **N'UTILISEZ PAS** le sachet de gel sur des bébés, enfants ou toute personne qui serait incapable de le retirer. Si vous souffrez de diabète, d'une mauvaise circulation sanguine, d'arthrite rhumatoïde ou de toute autre condition chronique, veuillez consulter un médecin avant d'utiliser ce produit. Les femmes enceintes **NE DOIVENT PAS** utiliser ce produit. **N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT** sur une peau sensible, si vous souffrez d'insensibilité cutanée ou avez une plaie ouverte. **N'UTILISEZ PAS** le sachet de gel pendant que vous dormez. **N'AVEZ PAS LE GEL. N'OUVREZ PAS** le sachet de gel et ne l'utilisez pas s'il est percé, s'il coule ou est endommagé d'une quelconque façon. **NE PLACEZ PAS** d'objets lourds ou n'appliquez aucune pression sur le dessus du sachet de gel. En cas d'irritation ou d'inconfort, retirez le produit immédiatement. Cessez d'utiliser le produit et consultez un médecin si la douleur s'intensifie ou persiste pendant plus de 3 jours. **GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX.**

ENTRETIEN : Nettoyez la surface du sachet de gel avec un savon ou un détergent doux ou de l'alcool.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ : La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.


Distribué par:

Supertek Canada Inc., Mont-Royal, QC H4T 1X2

WWW.CLIKIT.CA

Service à la clientèle: 1-800-304-8354

Lorem ipsum

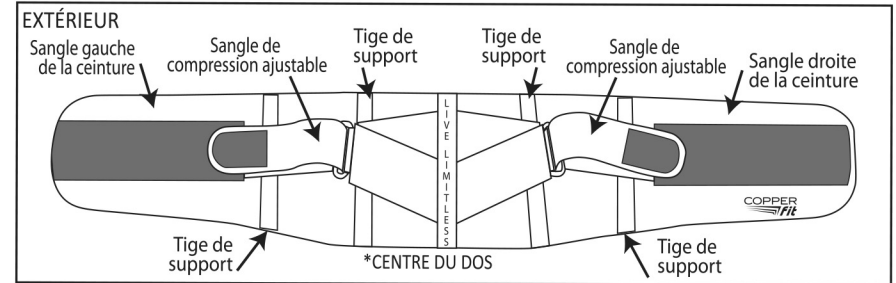


Comment insérer le support lombaire

Insérez le support lombaire dans la ceinture en vous assurant que le côté avec le logo Copper Fit est face vers le bas et vers l'extérieur. Le côté plat du support doit être en bas – image 1. Une fois le support lombaire inséré dans la pochette, consultez les images pour le positionner dans votre dos.





Comment insérer le sachet de gel chaud/froid

Suivez les instructions imprimées sur le sachet de gel chaud/froid pour le préparer. Insérez-le dans la pochette – voir les images.

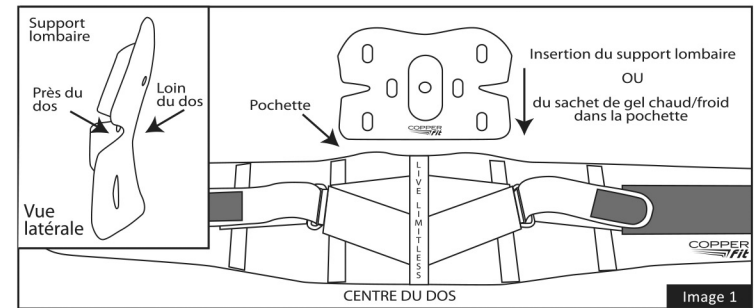

MODE D'EMPLOI

Détachez les sangles ajustables des deux côtés du bandage Rapid Relief Dos. Placez le bandage Rapid Relief Dos autour de votre taille en positionnant le centre* au bas du dos – image 2. Attachez le bandage Rapid Relief Dos en ramenant la sangle droite de la ceinture par-dessus la gauche – image 3. Ajustez le bandage en tirant doucement sur les sangles – image 4. Fixez les sangles d'ajustement sur le devant du bandage Rapid Relief Dos – image 5.

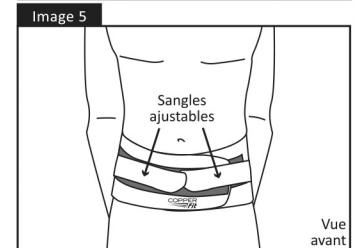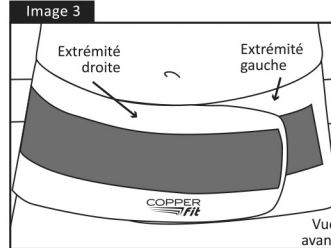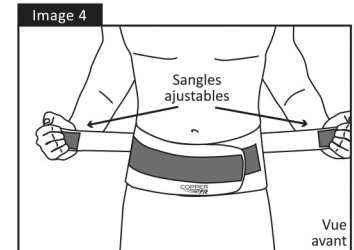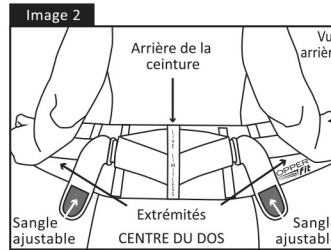

Fait de fibres infusées de cuivre • Extérieur: 100% Polyester • Centre: 100% Synthetic Rubber / Caoutchouc synthétique • Intérieur: 100% Polyester
LAVÉ À LA MAIN EN EAU FROIDE, SÉCHER À L'AIR • NE PAS JAVELLISER • NE PAS SÉCHER À LA MACHINE
NE PAS REPASSER • NE PAS NETTOYER À SEC