



Merci et félicitations pour avoir acheté les bas de compression anti-fatigue Miracle Copper^{MC}. Des bas à compression progressive avec fibres infusées de cuivre pour énergiser vos pieds et vos jambes fatigués !

MODE D'EMPLOI

- Insérez la main dans le bas, pincez le talon et tournez le bas partiellement à l'envers (illustration 1).
- Placez le bas sur les orteils (illustration 2) puis vers le talon en vous assurant que le talon est confortablement placé. La section de la jambe devrait être encore un peu à l'envers.
- Relevez lentement le bas jusqu'en haut du mollet (illustration 3). Ajustez-le jusqu'à ce qu'il soit confortable.
- Répétez les étapes 1 à 3 pour mettre l'autre bas.

SOIN ET LAVAGE

- Lavez à la main ou en machine à l'eau froide au cycle délicat.
- Lavez avec des vêtements de même couleur.
- N'UTILISEZ PAS DE JAVELLISANT.
- Faites sécher à l'air ou en machine à basse température.

83 % nylon, 10 % nylon cuivre CuTEC[®],
7 % Lycra[®] Spandex

Distribué par :

Supertek^{MC}

Mont-Royal, Qc H4T 1X2
client@supertek.ca

Service à la clientèle : 1-800-304-8354

FIG. 1

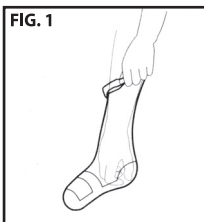


FIG. 2

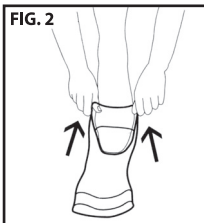


FIG. 3

